

## VOSS-PREMIUMKOFFER FÜR SEHTEST, AUDIOMETER, SPIROMETER

LEICHT, KOMPAKT, SICHER



Koffer für die meist genutzten diagnostischen Geräte in der Arbeitsmedizin: Binoptometer 4P Sehtest, Oscilla A50 Audiometer, ndd Easy On PC Spirometer.

Alle Geräte passen mit Zubehör in diesen robusten, kompakten und hochwertigen Rollkoffer. Das Sehtestgerät ist durch einen Layer getrennt.


Längs und quer tragbar, robust, schützt Ihre Ausrüstung, hochwertige Leichtlaufräder, professionelles Design, made in Germany.

Gewicht: 5,7 kg (ohne Geräte)  
Maße (BxHxT): 33cm x 57cm x 37cm  
Artikelnr.: B4P.BOX.KONGS

**Schritt 1:**  
Audiometer, Spirometer, Kabel und Zubehör im Boden ablegen.



**Schritt 2:**  
Zwischenlayer einlegen, Binoptometer auf kleinste Größe stellen.

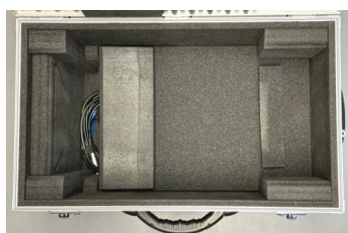

**Schritt 3:**  
Das Binoptometer 4P mit der Rückseite nach unten auf den Layer legen



**Schritt 4:**  
Koffer schließen, Griff ausziehen

